

# Quick Guide



**Kopf Modus**

1

**Haare zur Seite**



2

**Stirn trocknen**




3

**Mittig positionieren**  
Abstand (1-3 cm)



1

**Ohr nach hinten ziehen**  
Alter: bis 1 Jahr

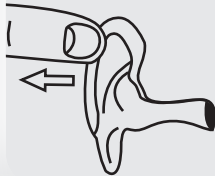


1

**Ohr nach hinten  
und oben ziehen**  
Alter: ab 1 Jahr




2

**vorsichtig einführen**

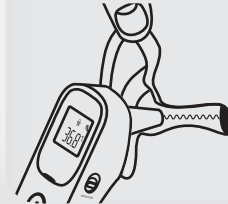


**Ohr Modus**

# Hinweis

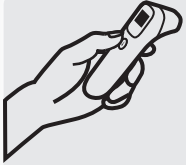

## Ruhig halten

Während der Messung  
nicht bewegen

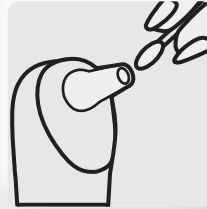

## Sensor reinigen

Nach mehrfacher Verwendung  
Sensor reinigen



## Halte die Stirn sauber

Stelle sicher, dass die Stirn keine  
Haare oder Schweißspuren aufweist



## Temperatur

10 - 40 °C  
50 - 104 °F



## Reinigung

Nach der Reinigung 5-10 Minuten  
warten, bevor Sie es benutzen



## Betriebsumgebung

Benutzer und Gerät müssen sich für mindestens  
30 Minuten in der Umgebung befinden, um die  
Temperatur anzugleichen





## Benutzung


Nicht innerhalb von 10 Sekunden  
wiederholt verwenden


**ADEBO**  
medical

## ADEBO Medical & Trade GmbH

 [www.adebo-medical.de](http://www.adebo-medical.de)

 030 / 887 085 39-0

 [info@adebo-medical.de](mailto:info@adebo-medical.de)

 Olivaer Platz 3 - 10707 Berlin - DE