


Technisches Datenblatt

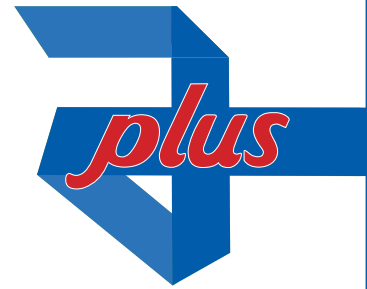

MaiMed[®] MyClean DS Wipes soft XXL vorgetränkte Vliestuchrolle

Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen

Geeignet für den Lebensmittelbereich, kein Abspülen/Nachwischen erforderlich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

- Tränklösung wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid und begrenzt viruzid PLUS (behüllte Viren gemäß RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota- und Adeno-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Aldehydfrei und QAV-frei
- Gute Benetzung
- Schnelles Auftrocknen
- Tränkflüssigkeit VAH-gelistet

Anwendung: Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.) Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und invasiven Medizinprodukten geeignet.

Ausführungen: MaiMed[®] MyClean DS Wipes soft XXL

Artikelbeschreibung	Duft	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	Neutral	70 Stück	79659	4046153121847	11519679	6 Rollen
Desinfektionstücher	Neutral	90 Stück	79662	4046153122363	-	6 Rollen


Einwirkzeiten:

Wirksamkeit der Tränklösung für den Hygienebereich	
Bakterizid, levurozid (EN 16615; hohe Belastung):	1 Minute
Bakterizid, levurozid (EN 13727, EN 13624; hohe Belastung):	1 Minute
Mykobakterizid (nach VAH-Methode; hohe Belastung):	5 Minuten
Tuberkulozid (EN 14348; geringe Belastung):	1 Minute
Wirksamkeit der Tränklösung für den Lebensmittelbereich	
Bakterizid (EN 1276; niedrige Belastung):	30 Sekunden
Levurozid (EN 1650; niedrige Belastung):	30 Sekunden
Bakterizid, levurozid (EN 13697; niedrige Belastung):	5 Minuten
Viruzidie nach EN 14476	
Begrenzt viruzid PLUS:	1 Minute
Vaccinia-Viren (geringe Belastung):	1 Minute
Adeno-Viren (geringe Belastung):	1 Minute
Noro-Viren (geringe Belastung):	1 Minute

Zusammensetzung: In 100 g Lösung sind enthalten: Wirkstoff: 50 g Ethanol



Technisches Datenblatt

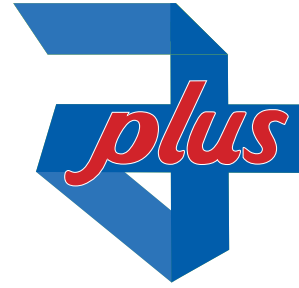

MaiMed[®] MyClean DS Wipes soft XXL

vorgetränkte Vliestuchrolle

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP, Biozidverordnung
Medizinprodukt: Klasse IIa
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

UFI: 3K80-S0U9-C00D-YCCD

eClass: 30-30-01-02

Biozidnummer: N-99040

Verwendbarkeit: 3 Jahre

Haltbarkeit nach Anbruch: Innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole:     **UN 3175**  **Achtung**
0482



 MaiMed[®] GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany
TD-MaiMed[®] MyClean DS Wipes soft XXL-2021-05